CIMCO-SCHUTZVISIER



SICHER GERÜSTET VON ANGESICHT!

Das CIMCO-Schutzvisier bietet Ihnen zuverlässigen Schutz! Der aus PETG gefertigte Schirm ist mit einem Stirnkissen aus PE-Schaum ausgestattet und lässt sich durch einen einfachen Steckmechanismus schnell zusammenbauen.

- Größeneinstellung für jede Kopfform
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Beständig gegen Desinfektionsmittel
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Für den Einsatz in Krankenhäusern geeignet



Der Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen.



MONTAGEANLEITUNG



Das Set wird in Einzelteilen geliefert und besteht aus einem Schirm, einem Stirnkissen und der Kopfhalterung.



Nehmen Sie nun das Stirnkissen uns kleben Sie es mittig auf die Kopfhalterung. Der gepolsterte Teil sollte in Ihre Richtung zeigen.



Führen Sie zunächst das breite Ende der Kopfhalterung durch die vorgegebene Stanzung in der linken oberen Ecken des Schirms. Stellen Sie sie anschließend parallel zur Kante des Schirms auf.



Führen Sie die beiden Enden der Kopfhalterung zusammen und stellen Sie so Ihren individuellen Kopfumfang ein. Dieser ist jederzeit änderbar.



Das schmale Ende der Kopfhalterung wird anschließend durch die Stanzung in der rechten oberen Ecke des Schirms geführt.



Das fertige Schutzvisier ist nun einsatzbereit.



