



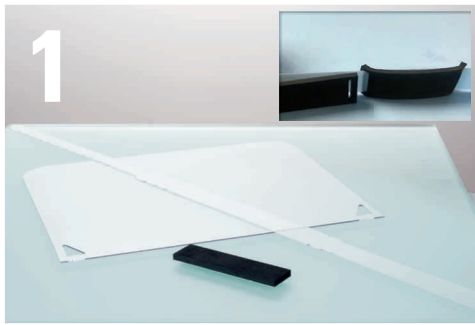


Sie erhalten eine Visierscheibe, ein Stirnband sowie eine Polsterung zum Aufkleben oder Strecken, je nach Ausführung.

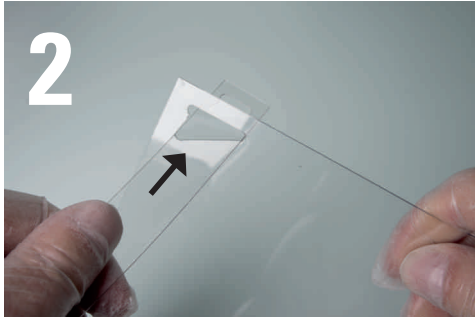


Als erstes schieben Sie das Stirnband mit der einzelnen Kerbung in die erste Öffnung.

Von innen nach außen, schräg, entsprechend der dadurch größeren Öffnung.

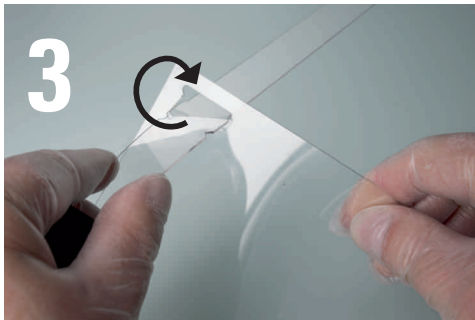

Mit einer Drehbewegung lässt sich das Stirnband nun fest einrasten.

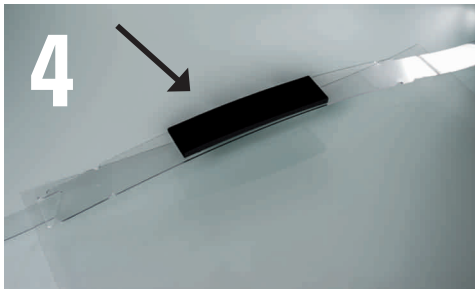

Die Polsterung kann nun von innen gegen das Stirnband mittig selbstklebend angebracht werden.



Hiernach die andere Seite des Stirnbandes in gleicher Weise einführen und einrasten lassen.



Durch die Wölbung wird die Luftzirkulation möglich und schafft genug Platz, für bspw. Brillenträger oder einem zusätzlichen Mundschutz.



Nun können Sie das Stirnband entsprechend Ihrer Kopfgröße auf die gleiche Art fixieren.



Alles lässt sich auch nachträglich verändern.



Fertig.



Beständig gegen handelsübliche Desinfektionsmittel und leicht zu pflegen mit einem weichem Tuch und etwas Glasreiniger.

Bleiben Sie gesund!